

Anleitung – Propolisverdampfer A4

Verwendung der Atemmaske

Der Propolisverdampfer „A4“ hat speziell für die Anwendung „Inhalation“ mit der Atemmaske ein eigenes Programm. Der dafür vorhandene Schaltknopf hat das Symbol „P“ (Inhalationsmodus, Atemmaske, Inhalation). Um die Propolisdämpfe erfolgreich einatmen zu können, muss vorher die im Gerät befindliche Kapsel so heiß sein, dass sie die ätherischen Öl-Dämpfe abgeben kann. Dann muss sichergestellt sein, dass diese Propolisdämpfe den ganzen Schlauch gut ausfüllen. Deshalb muss das Gerät vor dem Inhalieren mind. ½ besser noch eine Stunde auf Programm „P“ mit Schlauchanschluss und Maske betrieben werden. Sobald die ätherischen Öle (76 bisher nachgewiesene) die Atemmaske erreichen, also der Schlauch gut geflutet ist, kann die Anwendung beginnen.

Nutzt man das Programm mit dem „Ventilator“ Symbol, dann erhält man in Intervallen Propolisdämpfe für die Raumluft. Dies ist zum Inhalieren zu wenig. Bei dem Symbol „P“ läuft der Ventilator ständig und die Kapsel wird etwas höher erwärmt, da durch die Ein- und Ausatmung die Kapsel so stark abgekühlt wird, dass keine Dämpfe mehr abgesondert werden könnten.

Es sind 2 Atemmasken im Sortiment dabei. Eine für Kinder und eine für Erwachsene.

Wenn Sie es wünschen, liefern wir zu den originalen grünen Masken auch deutsch PARI-Masken. Um diese Masken auf den Schlauch stecken zu können benötigen Sie ein Übergangstück. Auch dieses können wir Ihnen liefern. Bitte sprechen Sie uns an.

Zusatz-Masken und Schläuche können Sie jederzeit nachbestellen.


WICHTIGER HINWEIS:

Mit Bestellung der Ware und Zahlung der Rechnung erklärt der Kunde, dass er für die Anwendung aller Inhalationsaufsätze, sowie für den Propolisverdampfer A4 in vollem Umfang selbst verantwortlich ist.

Der Verkäufer, wie auch der Hersteller übernehmen keinerlei Verantwortung.

Es handelt sich um ein Produkt zur Raumhygiene.

Der Wiederverkäufer ist verpflichtet dies auch seinen Kunden schriftlich mitzuteilen.

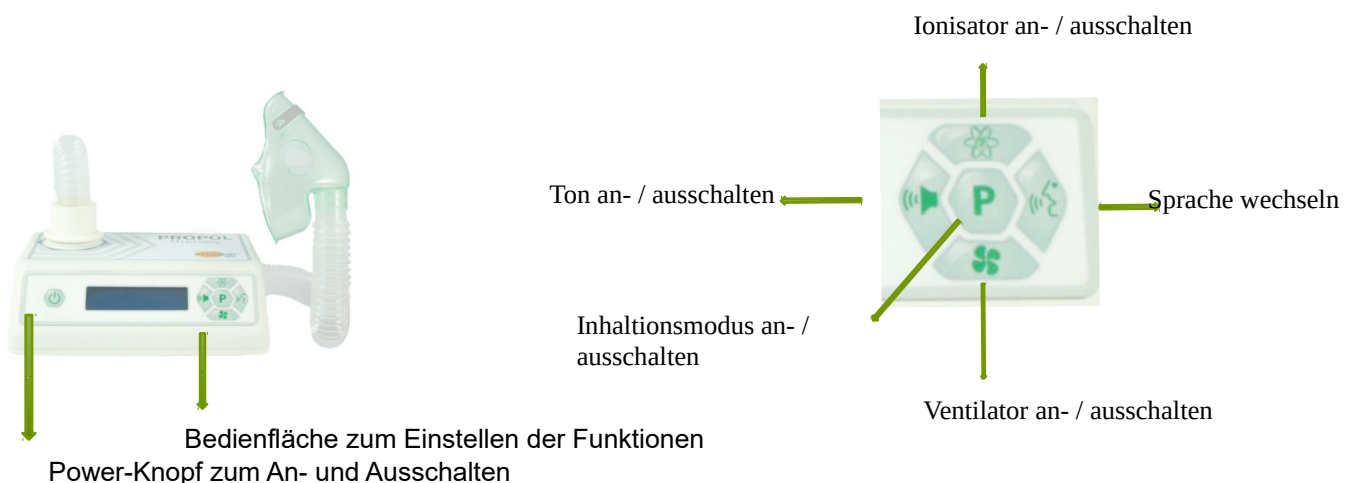

Display: Im Display wird angezeigt welche Funktionen an-/ bzw. ausgeschaltet sind. I = Ionisator ; V = Ventilator ; S = Ton ; D = Übrige Laufzeit der Kapsel

Das Display schaltet sich nach 30 min aus und kann über einen der rechten Knöpfe wieder angeschaltet werden.

Neustart des Gerätes: Power-Knopf 8-10 Sek. drücken, dann loslassen